

Thealoz Duo

IS Augndropar til verndandi, rakagefandi og mýkjandi meðferðar við miðlungi alvarlegum til alvarlegum augnþurrki.

ABAK® glas - Án rotvarnarefna

INNNIHALDSEFNI:

Trehalósi.....3 g
Natriumhýalúrónat.....0,15 g
Natriumklóríð, trómetamól, saltsýra,
vatn fyrir stungulyfað 100 ml

HEITI OG HEIMILISFANG FRAMLEIÐANDA

Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot ,
63017 Clermont-Ferrand, Cedex 2, FRAKKLAND

NOTKUN:

THEALOZ DUO inniheldur lausn til notkunar í augu eða á snertilinsur.

Mælt er með THEALOZ DUO við óþægindum, sviða, ertingu í auga.

Þessi óþægindi geta verið vegna utanaðkomandi þátta svo sem vinds, reyks, mengunar, ryks, sólríks eða kalds umhverfis, þurs hita, loftkælingar, flugferða eða langvarandi vinnu við tölvuskjá.

Þar sem THEALOZ DUO inniheldur ekki rotvarnarefni er fullt tillit tekið til augnvefja og því geta þeir sem nota snertilinsur af hvaða tegund sem er notað THEALOZ DUO. THEALOZ DUO tryggir vellíðan sem endist allan daginn.

EIGINLEIKAR:

THEALOZ DUO er dauðhreinsuð, jafnþrýstin vatnslausn með hlutlaust pH til notkunar í augu og inniheldur ekki rotvarnarefni. Aðalinnihaldsefnin eru trehalósi, tvísakkaríð sem finnst í mörgum jurtum og dýrum og natriumhýalúrónat, fjölsýkra sem er náttúrulega til staðar í auganu.

Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar trehalósa gefa efninu verndandi, andoxandi og rakagefandi eiginleika. Vegna þessara eiginleika er trehalósi mikilvægur hluti vatnssparandi verkunarháttá, sem sjást hjá sumum överum (hægari efnaskipti sem hjálpa þeim að lífa af við ofþornun).

Trehalósi hefur einnig eiginleika sem vernda og stuðla að jafnvægi í frumuhimnum, með því að hindra breytingar á próteinum og niðurbrot lípiða, auk andoxunaráhrifa.

Natriumhýalúrónat er náttúruleg fjölsýkra sem finnst í auga hjá mönnum og hefur einstaka vatnsbindandi eiginleika. Mikilvægir vatnsbindandi eiginleikar þess auka raka og mýkja yfirborð hornhimnu. Auk þess auka viðlöðunareiginleikar hennar viðlöðun augndropanna við yfirborð augans, sem eykur verkunartíma og stýttir þann tíma sem þekjuvefur hornhimnunnar er að gróa.

STERILE A

Lesið fylgiseðilinn



Les pakningsvedlegget

NO Øyedråper til beskyttende, fuktende og smørende behandling av moderat til svært tørre øyne. ABAK®-flaske - Uten konserveringsmiddel

SAMMENSETNING:

Trehalose.....3 g
Natriumhýaluronat.....0,15 g
Natriumklóríd, trometanol, hydrogenklóríd, vann til
injeksjonsvæskertil 100 ml

TILVIKERS NAVN OG ADRESSE:

Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot ,
63017 Clermont-Ferrand, Cedex 2, FRANKRIKE

BRUKSOMRÁÐE:

THEALOZ DUO inniheldur en oppløsning til bruk í øynene eller på kontaktlinser.
THEALOZ DUO anbefales ved ubehag, stikkende følelse og irritasjon i øynene.
Disse plagene kan skyldes ytre faktorer som vind, røyk, luftforurensning, støv, sol eller kulde, tørr varme, luftkondisjonering, flyreiser eller lange arbeidsøker foran en dataskjerm.

THEALOZ inneholder ikke konserveringsmiddel og tar dermed optimalt hensyn til øyets vev, og kan derfor også brukes av kontaktlinsebrukere uavhengig av linsetype. THEALOZ DUO gir et umiddelbart velbehag som varer hele dagen.

EGENSKAPER:

THEALOZ DUO er en steril, hypoton og pH-nøytral vannbasert oppløsning til øynene som ikke inneholder konserveringsmiddel. Hovedingrediensene er trehalose, et disakkarid som finnes i mange planter og dyr, og natriumhýaluronat, et polysakkarid som er naturlig forekommende i øyet.

De fysikalsk-kjemiske egenskapene til trehalose gir substansen beskyttende, antioksiderende og fuktende egenskaper. På grunn av disse egenskapene er trehalose en vesentlig del av den anhydrobiotiske mekanismen som ses hos visse mikroorganismer (en forsinket metabolsk tilstand som hjelper dem å overleve uttørring).

Trehalos beskytter og stabiliserer også cellemembraner ved å forebygge endring av proteiner og nedbrytning av lipider, og det er en antioksidant.

Natriumhýaluronat er et naturlig polysakkarid som finnes i menneskets øye og har unike vannbindende egenskaper. Disse viktige vannbindende egenskapene gir en bedre fukting og smøring av hornhinnens overflate. Dessuten gjør dets bioadhesive egenskaper at produktet festes bedre til øyets overflate, noe som gir en langvarig lindring og forkorter tilhelingstiden i hornhinnens epitel.



Les pakningsvedlegget



Les pakningsvedlegget

På grunn av den unike kombinasjonen av trehalose og natriumhýaluronat har THEALOZ DUO beskyttende, fuktende og smørende virkning på øyets overflate i lang tid og med maksimalt velbehag.

For maksimal toleranse inneholder THEALOZ DUO ikke konserveringsmiddel, takket være ABAK®-flasken. Dette innovative og patenterte hjelpemidlet muliggjør tilførsel av øyedråper gjennom en 0,2 mikrometer filtermembran, som hindrer bakterieforurensning av oppløsningen. Oppløsningen beskyttes og kan brukes i inntil 3 måneder etter åpning av flasken.

KONTRAINDIKASJONER OG FORSIKTIGHETSREGLER:

- Bruk ikke THEALOZ DUO dersom du er allergisk overfor noen av innholdsstoffene.
- Unngå å berøre øyets overflate med flaskens spiss.
- Skal ikke injiseres, skal ikke svelges.
- Dersom sikkerhetsringen er skadet skal produktet ikke brukes.
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

INTERAKSJON:

La det gå minst 10 minutter mellom tilførsel av to forskjellige øyeprodukter.

HVORDAN DU BRUKER DETTE PRODUKTET:

BRUKSMÅTE:

KUN TIL BRUK I ØYNENE
- Vask hendene godt før bruk.
- Unngå å berøre øyne og øyelokk med flaskens spiss, spesielt dersom du tror at du har en øyeinfeksjon.
- Drypp en dråpe i nedre konjunktivalsekk mens du forsiktig drar det nedre øyelokket litt ned og samtidig ser oppover.
- Sett på hetten etter bruk.

DOSERING:

1 dråpe i hvert øye, 4 -6 ganger daglig.
THEALOZ DUO kan brukes sammen med kontaktlinser.

BIVIRKNINGER:

Lett øyeirritasjon kan oppstå i sjeldne tilfeller.

OPPBEVARING:

Flasken skal kastes 3 måneder etter åpning, selv om det er oppløsning igjen i den.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

SKAL IKKE BRUKES ETTER UTLØPSDATOEN SOM ER ANGITT PÅ PAKNINGEN.

Utløpsdatoen gjelder produkt i uåpnet pakning, korrekt oppbevart. Bruk ikke en skadet flaske.

Pakningsvedlegget ble oppdatert: 02/2013



25°C
CE 0459

